

Oculoheel®

Ojo irritado Spray ocular

Descripción:

Oculoheel Ojo irritado® Spray ocular 2 en 1 está indicado en el tratamiento de los ojos irritados y rojos debidos a:

- polen, polvo, pelos de mascotas, maquillaje;
- alteración de la capa lipídica del borde del párpado, es decir, Blefaritis;
- condiciones ambientales como viento, exposición al sol o contaminación;

Gracias a su componente liposomal, **Oculoheel Ojo irritado® Spray ocular** está especialmente indicado para proteger el ojo porque, una vez pulverizado directamente sobre el párpado, es capaz de restaurar la película hidrolipídica lagrimal, ayudando a aliviar rápidamente las molestias ocasionadas por su alteración. Además, el extracto de Aloe incluido en su formulación proporciona un efecto refrescante y calmante a los párpados irritados y con sensación de quemazón. También contiene vitamina E, un antioxidante.

La específica bomba pulverizadora APF (Advanced Preservative-Free) previene la contaminación externa gracias a su "tecnología vaciado-sellado (tip seal)" que actúa como barrera física sellando la abertura con un mecanismo de resorte al liberar la presión de la bomba, mientras que la membrana de PTFE filtra el aire de entrada después de dispensar el producto. Gracias a este doble mecanismo, un mismo envase puede tener múltiples usuarios sin riesgo de contaminación.

Indicado en adultos y niños a partir de 3 años.

Oculoheel Ojo irritado® Spray ocular hace que el uso prolongado de lentes de contacto sea más cómodo durante el día gracias a su efecto lubricante en la superficie alrededor del ojo.

Oculoheel Ojo irritado® Spray ocular se puede utilizar con maquillaje resistente al agua.

Ingredientes principales: Aloe Barbadensis leaf extract (0,3%), Liposomes (Lecithin + Tocopherol) (0,45%).

Otros ingredientes: Water, Glycerine, Panthenol, Sodium Phosphate, Sodium hydroxymethylglycinate, Disodium phosphate, Chamomilla Recutita Matricaria flower extract.

Cómo funciona Oculoheel Ojo irritado® Spray ocular, spray 2 en 1 para ojo irritado/rojo: La superficie del ojo está cubierta por una película lagrimal, una capa líquida con propiedades protectoras, hidratantes, lubricantes, limpiadoras y nutritivas. La capa más externa de esta película consiste en una capa lipídica formada por las secreciones de glándulas específicas, llamadas glándulas de Meibomio. El componente lipídico es responsable de la retención y evaporación del líquido lagrimal, que tiene un papel clave en la lubricación ocular. Cuando la capa lipídica se ve comprometida por la exposición a condiciones ambientales como el viento o el sol, polen, polvo o pelos de mascotas, los ojos tienden a irritarse y ponerse rojos.


Oculoheel Ojo irritado® Spray ocular 2 en 1 para ojos irritados/rojos, gracias a su tecnología a base de liposomas proporciona alivio para la irritación y enrojecimiento, especialmente típico cuando la capa lipídica del borde del párpado se ve comprometida. La capa lipídica es la capa externa de la película lagrimal, que tiene una acción protectora sobre el ojo. Cuando la capa lipídica se ve alterada, puede resultar en una irritación y/o inflamación del ojo.

Gracias a su contenido en liposomas, **Oculoheel Ojo irritado® Spray ocular**, ayuda a restablecer el equilibrio de la capa lipídica alterada y su función como barrera fisiológica. Además, gracias a la especial estructura de los liposomas, con su doble capa de fosfolípidos y centro acuoso, pueden distribuir a los tejidos sustancias hidrofóbicas, como por ejemplo, la vitamina E. Esta acción favorece la acción fisiológica lubricante y protectora de la película lagrimal, que a su vez alivia el picor y el enrojecimiento, restableciendo la adecuada función visual.

Además, el extracto de Aloe incluido en su formulación proporciona un efecto refrescante y calmante a los párpados irritados y con sensación de quemazón.

Cómo utilizar Oculoheel Ojo irritado® Spray ocular: Lávese bien las manos antes de usar el producto. Agite el frasco. Antes del primer uso, presione completamente la bomba de pulverización 3-4 veces para permitir que se llene. Pulverizar sobre los párpados cerrados 1-2 veces en cada uno de ellos desde una distancia de unos 10 cm, 2-3 veces al día.

El accionado del dispositivo debe ser uniforme y sin interrupción. Debe accionarse el dispositivo por completo, hasta el final de la dosificación. El accionado debe realizarse con una velocidad adecuada. El dispositivo debe usarse en posición vertical (no horizontal ni boca abajo).

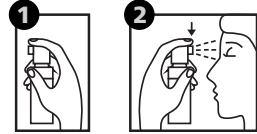

Interacciones: No se conocen interacciones con medicamentos. Si está tomando algún medicamento para los ojos, consulte a su médico antes de usar este producto.

Envase: Frasco de 10 ml, aproximadamente 200 pulverizaciones.

Contraindicaciones: Sensibilidad o alergia conocida a cualquier ingrediente.

Precauciones y advertencias:

Agite el frasco antes de usarlo.

Evite tocar la superficie del párpado con la boquilla de pulverización.

Evite tocar la boquilla de pulverización con los dedos.

Para usuarios de lentes de contacto: para una adecuada distribución de Oculoheel Ojo irritado® Spray ocular, el producto debe utilizarse entre usos.

NO ROCIAR SOBRE LOS OJOS ABIERTOS. En caso de contacto directo con el ojo abierto, el producto puede provocar una leve sensación de ardor, que desaparece rápidamente sin secuelas. Si la sensación de ardor persiste, enjuague los ojos con abundante agua.

Si experimenta algún efecto secundario, deje de usar el producto, comuníquese con su médico e informe al fabricante.

No usar junto con otras terapias o tratamientos que impliquen la toma o el uso tóxico de otros productos sanitarios, medicamentos o suplementos.

Cualquier accidente grave que se produzca en relación con el producto sanitario debe notificarse de inmediato al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro donde resida el usuario y / o el paciente.

Antes del primer uso, compruebe que el producto esté correctamente cerrado y no esté dañado.

No utilice el producto después de la fecha de caducidad impresa en el envase.

No utilice el producto en caso de hipersensibilidad o alergia conocida a uno o más de sus ingredientes.

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

El uso en niños debe ser supervisado por un adulto.

Durante el embarazo y la lactancia, consulte primero a su médico.

Producto solo para uso externo.

Condiciones de almacenamiento: El producto se puede utilizar hasta 6 meses después de abierto. No use **Oculoheel Ojo irritado® Spray ocular** después de la fecha de caducidad impresa en la caja. La fecha de caducidad se refiere al producto correctamente almacenado en su envase original sin daños. Deseche el producto no utilizado cuando se alcance su fecha de caducidad.

Rev. 10/2021

Nirial Pharma srl
Via Rovani, 7
20123 Milano (IT)

REF
19473

CE 0051
Producto sanitario

Distribuido por:

Laboratorios Heel España, S.A.U.
C/ Madroño, s/n 28770 Colmenar Viejo (Madrid)
Heel responde: 918473910
consulta@heel.es

10 ml



Mantener alejado de fuentes de calor



Mantener en lugar seco



Fecha de caducidad



No tirar al medio ambiente después de su uso



Lea el prospecto antes de usar



Temperatura de almacenamiento

Lote

Código de producto

Fabricante

Producto Sanitario

-Heel